


Mesurer en toute simplicité.

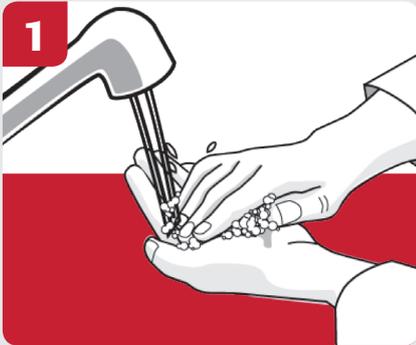


1 Lavez-vous les mains et essuyez-les avant d'effectuer une mesure de glycémie.



2 Vérifiez la date de péremption sur le flacon de bandelettes réactives. N'utilisez pas de bandelettes réactives périmées.



3 Retirez une bandelette réactive du flacon de bandelettes, puis refermez-le correctement.

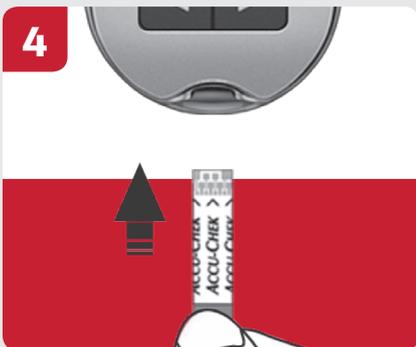

4 Insérez la bandelette réactive dans le lecteur en respectant le sens des flèches jusqu'à ce que le lecteur émette un signal sonore.



Le symbole d'une goutte de sang clignotante s'affiche.




5 Appuyez fermement l'autopiqueur Accu-Chek® Softclicx sur le côté de l'extrémité du doigt et enfoncez le bouton de déclenchement jaune afin de ponctionner le doigt.



6 Mettez la goutte de sang obtenue en contact avec l'extrémité de la bandelette réactive. Ne déposez pas de sang sur le dessus de la bandelette réactive.



Le lecteur émet un signal sonore et un symbole clignote dès qu'une quantité suffisante de sang a été aspirée par la bandelette réactive.

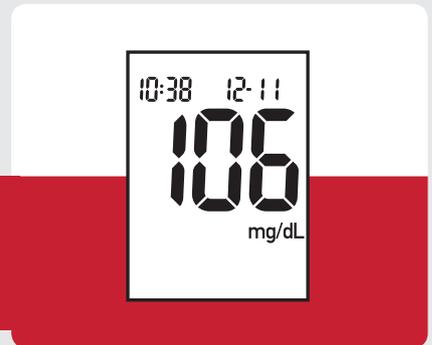

Le résultat s'affiche à l'écran au bout de 5 secondes.