

PG- PAINGONE PLUS

Groupe : PainGone TENS pen

Sous-groupe :



PainGone Plus

IDEAL POUR SOULAGER LES DOULEURS LOCALISÉES:

- * Idéal pour soulager les zones de douleurs chroniques et ou aiguës localisées
- * Appareil médical de classe 2a, prouvé cliniquement
- * Thérapie d'électrostimulation musculaire
- * Soulage la douleur rapidement et efficacement
- * Sans médicament
- * Soulagement instantané
- * Fonctionne au travers de vêtements légers
- * Utilisation aussi fréquente que nécessaire
- * Rapide et facile: pour une utilisation à domicile

* Fonctionnement automatique:

1. Prenez le Paingone dans votre main
2. Assurez-vous de bien entourer la zone métallique avec votre paume
3. Placez le Paingone en contact avec la zone douloureuse (en cas de maux de tête, placez le sur le bas du cou)
4. Maintenez le bouton orange enfoncé pendant 30 secondes
5. Répétez autant de fois que nécessaire

* Contre-indications:

1. Femmes enceintes
2. Personnes portant un pacemaker ou implant électrique
3. Personnes épileptiques
4. Personnes souffrant de problèmes cardiaques

* CODE ACL: 6084660

* CNK CODE: 3697950

| Emballage | Quantité | code EAN | L(mm) | l(mm) | H(mm) | Kg | Garantie (mois): | 24 |
|-----------|----------|----------------|-------|-------|-------|------|------------------|----------|
| PIECE | 1 | 5060035703876 | 183 | 46 | 96 | 0,15 | Tarif Douanier: | 90189075 |
| CART_OUT | 10 | 05060035703876 | 210 | 210 | 250 | 2,32 | | |
| PALET | 1500 | 85060035703889 | 1200 | 800 | 1800 | 225 | | |

Nombre batteries: 1xAAA

Batteries Inclus

Alimentation: