



MODE D'EMPLOI [fr]

Cose-Protect® Suppositoires

Dispositif médical

Ce mode d'emploi a été rédigé à votre intention afin de répondre aux questions éventuelles concernant l'utilisation de Cose-Protect® suppositoires. Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à votre pharmacien.

Qu'est-ce que Cose-Protect®?

Cose-Protect® contient un complexe protecteur de la peau à utiliser en cas d'hémorroïdes.

Ce complexe protecteur de la peau a des propriétés hydrofuges. Il est conçu pour être appliqué dans et autour de l'anus et forme une fine couche sur la région anale. Les zones douloureuses sont ainsi protégées de l'irritation. De plus cette application produit un effet de glissement mécanique, facilitant l'expulsion des selles. Ceci contribue à protéger contre la répétition des symptômes.

Que contient Cose-Protect® suppositoires?

Cose-Protect® contient un complexe protecteur obtenu à partir de cire de jojoba, de cire d'abeille jaune et d'isononanoate de cétoestéaryle. Outre ces constituants, Cose-Protect® suppositoires contient de la graisse solide.

Quand utiliser Cose-Protect® suppositoires?

Cose-Protect® peut être utilisé à tout moment selon les besoins.


Il est conseillé de l'appliquer matin et soir. En cas de plaintes sévères, plus de 2 suppositoires peuvent être utilisés par jour.

Cose-Protect® peut être utilisé sans risque pendant la grossesse et l'allaitement

Comment utiliser Cose-Protect® suppositoires?

Enfoncer le suppositoire profondément dans l'anus avec le doigt pour assurer une bonne protection durable.

Oter le suppositoire de l'emballage :

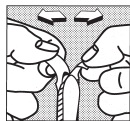

Séparer les 2 parties supérieures de la feuille d'aluminium entourant le suppositoire afin de l'en extraire aisément.

Remarque: l'emploi de Cose-Protect® peut tacher les vêtements. Il est conseillé d'utiliser une protection appropriée.

Combien de temps utiliser Cose-Protect®?

Cose-Protect® peut être utilisé souvent selon les besoins et jusqu'à 4 semaines sans interruption. Une utilisation régulière de Cose-Protect® peut contribuer à protéger contre la répétition des symptômes des hémorroïdes.

Quand ne pouvez-vous pas utiliser Cose-Protect®?

Cose-Protect® ne peut pas être utilisé en même temps que d'autres préparations traitant les affections aiguës accompagnées de démangeaisons, de sensations de picotements ou de brûlures, de sécrétions ou de douleurs de la région anale. Il est possible que le complexe protecteur Cose-Protect® réduise l'action de ces préparations.

Cose-Protect® suppositoires ne peut pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants des suppositoires Cose-Protect®.

Quels effets secondaires peuvent survenir en cas d'utilisation de Cose-Protect® suppositoires?

Aucun effet secondaire n'a été observé à ce jour en cas d'utilisation correcte de Cose-Protect®.

Quelles précautions particulières sont à prendre?

Le contact direct entre le préservatif masculin (condom) et Cose-Protect altère fortement les propriétés assurant la solidité du préservatif. Dès lors, la sécurité procurée par l'emploi du préservatif n'est plus garantie.

Conditionnements disponibles

Cose-Protect® est disponible en emballage de 20 suppositoires.

Comment et combien de temps conserver Cose-Protect® suppositoires?

La date de conservation est indiquée sur l'emballage externe et sur le blister.

Ne plus utiliser les suppositoires après cette date.

Conserver Cose-Protect® suppositoires à une température ne dépassant pas 25 °C.

Date de la dernière mise à jour de la notice d'utilisation: Janvier 2012.

CE 0482

Fabricant:

Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH
Rigistrasse 2, 12277 Berlin, Allemagne

Distributeur:

Will-Pharma

Rue du Manil 80, 1301 Wavre, Belgique