

OPTI-FREE® EXPRESS® Multi-Purpose Disinfecting Solution
SANS MASSAGE CONFORT PROLONGE

NOTICE

Lire attentivement cette notice et la conserver pour la réutiliser.

DESCRIPTION:

OPTI-FREE® EXPRESS® Solution Multi-Fonctions de Décontamination contient du POLYQUAD® et de l'ALDOX® qui détruisent les microorganismes nuisibles mais sont doux pour l'œil. Il contient aussi du citrate, qui élimine les dépôts de protéines des lentilles lors du trempage.

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD procure un confort de port pour toute la journée, y compris pour les yeux sensibles.

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD hydrate vos lentilles et diminue les risques d'irritation légère et de gêne lors du port de vos lentilles. Avec **OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** l'utilisation d'une solution saline n'est pas nécessaire.

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD est indiqué pour la décontamination, le nettoyage, le rinçage, l'hydratation et la conservation de toutes les lentilles de contact souples, y compris les lentilles en silicone hydrogel.

COMPOSITION:

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD est une solution aqueuse stérile, tamponnée, isotonique contenant du chlorure de sodium, du sorbitol, de l'édétate disodique, de l'acide borique, de l'aminométhylpropanol, du citrate et du TETRONIC®* 1304 comme agents nettoyants. Les conservateurs sont POLYQUAD® (chlorure de polidronium) 0,001% et ALDOX® (myristamidopropyl diméthylamine) 0,0005%.

*TETRONIC® = marque déposée de BASF

CONTRE-INDICATIONS (dans quels cas ne pas utiliser ce produit):

Les personnes allergiques à l'un des composants d'**OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** ne doivent pas utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS D'ORDRE GENERAL :

- Lavez-vous et rincez-vous toujours les mains avant de manipuler vos lentilles de contact. Commencez toujours la manipulation par la même lentille, gauche ou droite, pour éviter de les confondre.
- Avant d'utiliser un nouvel étui de trempage ALCON®, rincez-le avec **OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** afin d'éliminer tout débris.
- Après utilisation, videz toujours l'étui de trempage, rincez-le avec **OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** et laissez-le sécher à l'air. Alcon vous recommande de remplacer fréquemment votre étui de trempage.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE, LA DECONTAMINATION ET L'ELIMINATION DES PROTEINES:

Rincez abondamment chaque face de la lentille avec **OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD**. Remplissez votre étui de trempage ALCON® avec une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** suffisante pour couvrir les lentilles. Laissez les lentilles dans l'étui de trempage fermé toute la nuit ou au moins pendant 6 heures. Avant de porter vos lentilles, rincez abondamment chaque face de la lentille afin d'éliminer tout débris.

Votre spécialiste peut vous recommander d'utiliser des produits ou des procédés complémentaires pour entretenir vos lentilles, en fonction de la qualité de vos larmes et de la fréquence d'utilisation de vos lentilles. Suivez toujours les instructions de votre spécialiste.

Il est possible de conserver vos lentilles dans un étui non ouvert pendant trente jours maximum, jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être portées. Si vous conservez vos lentilles plus longtemps, il faut les nettoyer et les décontaminer avec une nouvelle quantité de solution tous les trente jours et avant de les porter.

HYDRATATION:

En cas d'irritation légère, de gêne ou de vision trouble lors du port de vos lentilles de contact, mettez une ou deux gouttes d'**OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** directement dans l'œil et clignez des yeux deux ou trois fois. Vous pouvez utiliser **OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD** pour hydrater vos lentilles autant de fois que vous en avez besoin pendant la journée.

MISES EN GARDE:

Pour bien utiliser et prendre soin de vos lentilles et produits d'entretien, y compris l'étui de trempage, il est essentiel de suivre les instructions de votre spécialiste et toutes celles de la notice.

Si vous ressentez une gêne persistante dans l'œil, un larmolement excessif, des modifications de la vision, ou une rougeur de l'œil, retirez IMMEDIATEMENT vos lentilles et consultez votre spécialiste, car le problème pourrait s'aggraver.

PRECAUTIONS:

- Utilisez toujours une nouvelle quantité d'**OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD**. Ne jamais réutiliser la solution de votre étui de trempage.
 - Utilisez toujours l'étui de trempage **ALCON®**.
 - Pour éviter toute contamination, ne jamais rien toucher avec l'embout du flacon.
 - Remplacez le capuchon après utilisation.
 - A conserver à température ambiante. Evitez les températures excessives.
 - Gardez le flacon bien fermé quand vous ne l'utilisez pas.
-
- A utiliser avant la date de péremption indiquée sur le produit. 
 - Jetez toute solution restante six mois après la première ouverture.
 - Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - Ne pas utiliser pour une décontamination à chaud (thermique).

PRESENTATION:

OPTI-FREE® EXPRESS® SMFD, stérilisé par filtration, est disponible en flacons plastique de 120 ml et 355 ml.



Etui de trempage **ALCON®** (**OPTIONAL**)

DISTRIBUTEUR POUR LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG: (OPTIONAL)

ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Royaume-Uni

Brevets US n° 5393491, 5573726, 5631005, 6319464 et 6365636 (**OPTIONAL**)
Brevets européens n° 0669803 et 0948357 (**OPTIONAL**)



© XXXX Novartis