

AEROMEDIK Set Aérosol adulte

Pour compresseur aérosols

CNK: 2680-981

Contient : 1 embout buccal, 1 masque adulte, 1 tube, 1 nébuliseur

1. Ouvrez prudemment le nébuliseur.
2. Remplissez la base du nébuliseur avec les médicaments en respectant la prescription médicale.
3. Replacez le haut du nébuliseur et tournez doucement pour assembler le nébuliseur.
4. Fixez une extrémité du tube à la base du nébuliseur et l'autre extrémité du tube à la connexion prévue à cet effet sur l'appareil.
5. Placez le masque ou l'embout buccal, au choix, sur la partie supérieure
6. Commencez le traitement.
7. Après utilisation, ouvrez le nébuliseur et nettoyez-le avec de l'eau chaude et un détergent doux. Bien rincer et laisser sécher complètement avant une prochaine utilisation.

IMPORTANT:

- Pour tous les médicaments
- Pour utilisation par un seul patient
- Conforme à la norme Européenne 13544-1

Aeromedik Aerosol Set Volwassene

Voor Aerosol Compressor

CNK: 2680-981

Bevat : 1 mondstuk, 1 masker voor volw., 1 luchtslang, 1 verstuiver

1. Draai voorzichtig de verstuiver open.
2. Vul het onderste gedeelte van de verstuiver met de medicatie die uw arts heeft voorgeschreven.
3. Draai het bovenste en het onderste deel van de verstuiver opnieuw op mekaar.
4. Bevestig een uiteinde van de luchtslang aan de onderzijde van de verstuiver. Bevestig het andere uiteinde aan de buisaansluiting van het aerosol-toestel.
5. Bevestig het mondstuk of het masker, naar keuze, op het bovenste deel van de verstuiver.
6. Start de behandeling
7. Na gebruik de verstuiver uit mekaar halen en schoonmaken met warm water en een zachte detergent. Grondig spoelen en volledig laten drogen voor volgend gebruik.

BELANGRIJK:

- voor alle medicatie
- voor gebruik door uitsluitend één persoon
- Conform Europese norm 13544-1