

MERCUROCHROME COUSSINETS CONFORT PLANTAIRE - 3790342

FR

➤ Description

Les Coussinets confort plantaire des Laboratoires Mercurochrome® absorbent les chocs et les pressions grâce à leur gel polymère protecteur aux propriétés viscoélastiques similaires à celles du capiton plantaire humain. Ils s'adaptent à toutes les tailles et formes de pieds* et aux chaussures.

*Taille unique 36-41 (EU)

➤ Conseils d'utilisation et précautions d'emploi

Enfiler un coussinet sur chaque pied en veillant à utiliser le coussinet adapté (une boîte contient un coussinet pied droit et un coussinet pied gauche). Passer le gros orteil dans la plus petite ouverture. Nettoyer les coussinets après utilisation à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher à l'air libre.

Utiliser ce produit maximum 16 heures par jour. Ne pas utiliser sur des plaies cutanées. Usage externe. Laisser hors de la portée des enfants. En cas de DIABETE ou de troubles circulatoires des membres inférieurs, demander l'avis d'un professionnel avant utilisation. En cas de douleurs persistantes, consulter un médecin. Si le produit cause un inconfort, une rougeur cutanée, ou une augmentation de la douleur, stopper l'utilisation du produit et consulter un médecin. Une exposition à la lumière du soleil peut faire varier la couleur d'origine du produit

➤ Ingrédients

Gel polymère absorbe-pressions.

NL

➤ Beschrijving

De Kussentjes voor het comfort van de welving van de voet van Laboratoires Mercurochrome® absorberen de schokken en druk dankzij de polymeergel met visco-elastische eigenschappen die lijken op de kenmerken van de menselijke vetkussentjes onder de hiel. Kunnen ze worden aangepast aan alle maten en vormen van voeten* en aan schoenen. *Eén maat 36-41 (EU)

➤ Gebruiksadviezen en voorzorgsmaatregelen

Trek een kussentje aan onder elke voetzool en let erop dat u het gepaste kussentje gebruikt (één doos bevat een kussentje voor de rechtervoet en een kussentje voor de linkervoet). Plaats de grote teen in de kleinste opening. Maak de kussentjes na gebruik schoon met een zeepsopje, spoel af en laat aan de lucht drogen. (EU normen)

Gebruik dit product maximum 16 uur per dag. Niet gebruiken op huidwonden. Uwendig gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Win het advies in van een zorgverlener voor gebruik van het product in het geval van DIABETES of stoornissen met de bloedsomloop van de onderste ledematen. Raadpleeg een arts in het geval van aanhoudende pijn. Als het product hinder, roodheid van de huid of een verhoogde pijn veroorzaakt, moet u het gebruik van dit product stopzetten en een arts raadplegen.

➤ Ingrediënten

Polymeergel die de druk absorbeert.